

# AMRUS



Победитель международной фармацевтической премии «Зеленый крест»  
в категории «Бренд года» в номинации  
«Медицинская техника и средства реабилитации»

**Изделия ортопедические для профилактики и  
реабилитации инвалидов -  
Кресла-туалеты серии АМСВ с принадлежностями:  
кресло-туалет модели АМСВ6803  
Руководство по эксплуатации**



## **РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ**

**Производитель:** «Амрус Энтерпрайзис Лтд.», США

Amrus Enterprises, Ltd., 720 King Georges Post Road, Suite 305, Fords, New Jersey 08863-1974, USA

**Место производства:** Home Medical Products Inc.,

No. 1, Dama Rd., Waipu Dist., Taichung City, 438, Taiwan (Китай)

**Импортер/Организация, уполномоченная на принятие претензий:**

ЗАО фирма «Москва-Амрос», Россия, Москва, 115054, ул.Пятницкая, д.71/5, стр.4, эт.1

**Регистрационное удостоверение:** № ФСЗ 2007/00749 от 26.11.2021

**Соответствие:** ГОСТ Р 50444-92 (р.р.3,4)

**Класс потенциального риска применения:** 1

**Группа 2** по воспринимаемым механическим воздействиям

**Изделие нестерильно** и стерилизации не подлежит

Изделие устойчиво к агрессивным биологическим жидкостям

Допускается применение со всеми типами керамических унитазов по ГОСТ 30493

Благодарим Вас за приобретение функционального и долговечного кресла-туалета (далее - изделия) фирмы Амрус Энтерпрайзис Лтд., США.

Для удобства пользователей изделие поставляется в продажу в разобранном виде.

Перед сборкой изделия проверьте его комплектность согласно таблице 1.

Таблица 1.

Позиция	Наименование	Кол-во, шт.
1	Перекладина	2
2	Опора	2
3	Боковина	2
4	Спинка	1
5	Сиденье	1
6	Крышка сиденья	1
7	Приемник-резервуар	1
8	Крышка приемника-резервуара	1
9	Винт	6
10	Гайка глухая	4
11	Гайка «барашек»	2
12	Шайба малая	4
13	Шайба большая	2
14	Тубус	1

## ПОРЯДОК СБОРКИ

Освободите комплектующие части изделия от транспортной упаковки.

**Соберите раму** изделия (Рисунок 1), вставив перекладины (1) лапками вниз в пазы опор (2).

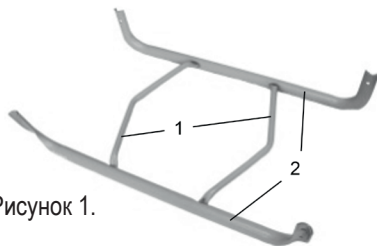


Рисунок 1.

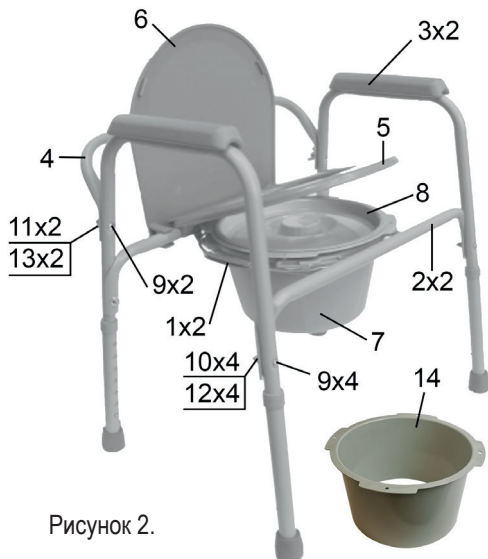


Рисунок 2.

**Соберите изделие** (Рисунок 2):

- соедините раму (в сборе) с боковинами (3) при помощи четырех винтов (9) с шайбами малыми (12) и четырех гаек глухих (10);
- прикрепите спинку (4) к боковинам (3) двумя винтами (9) с гайками «барашек» (11) и шайбами большими (13), используя отвертку с крестообразным наконечником;
- закрепите на опоре рамы сиденье (5) и крышку сиденья (6), для этого уложите сиденье горизонтально на раму, чтобы его крепление находилось на опоре рамы под спинкой, и нажмите на крепление сиденья до его фиксации (до щелчка), аналогично закрепите крышку сиденья;
- поверните в вертикальное положение крышку сиденья (6) и сиденье (5);

- установите в гнездо рамы приемник-резервуар (7) или тубус (14) так, чтобы опорные плечики и поворотная ручка приемника не препятствовали опусканию сиденья (8) до упора в раму;
- закройте приемник-резервуар крышкой (14).

## **ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ**

Соберите изделие.

Отрегулируйте выдвигающиеся нижние части опор для получения нужной высоты изделия.

Убедитесь в надежном закреплении резьбовых соединений и кнопок фиксаторов на нижних частях опор.

## **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ**

При переходе от инвалидной коляски к изделию убедитесь, что колеса инвалидного кресла-коляски заторможены.

Поднимитесь, опираясь на поручни кресла-коляски.

Перенесите руку на верхнюю часть боковины изделия. Если поражена нижняя конечность, то сначала перенесите руку, противоположную пораженной стороне.

Повернитесь и сядьте на сиденье изделия.

Для использования изделия совместно с унитазом удалите из гнезда рамы приемник-резервуар, отрегулируйте высоту изделия, разместите изделие над унитазом, установите в гнездо рамы на место приемника – резервуара тубус (направитель).

Переносите собранное изделие, держа его за верхние части боковин.

## **ОБСЛУЖИВАНИЕ**

После применения и перед хранением очистите изделие водой с нейтральным моющим средством, затем вытрите его сухой тканью.

Для удаления сильных загрязнений допустимо использовать щетку или ершик.

Не применяйте растворители (бензин, ацетон и пр.) или любые сильные моющие средства.

Не применяйте абразивные вещества и инструменты.

При необходимости проведения дезинфекции химическим методом руководствуйтесь методическими указаниями МУ-287-113.

## **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Предохраняйте изделие от ударов и повреждений.

Не допускайте прикосновения изделия к электрическим проводам.

Вовремя заменяйте изношенные резиновые наконечники опор.

## **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Габариты (Ширина x Глубина x Высота), мм	640 x 520 x 610 - 765
Ширина x Глубина x Высота сиденья (от пола) мм	335 x 370 x 430 - 580
Емкость приемника-резервуара, не менее, л	5
Наружный диаметр приемника-резервуара, мм	285
Высота приемника-резервуара, мм	200
Диаметр тубуса, мм	295
Длина тубуса, мм	170
Максимально допустимая масса пользователя, кг	100
Масса кресла-туалета, не более, кг	6

# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

**Срок действия гарантии** – 12 месяцев с даты продажи.

**Дата продажи** отмечается продавцом в гарантийном талоне.

**Гарантийное обслуживание** производится только при наличии настоящего руководства по эксплуатации.

**Гарантия не распространяется** на транспортную упаковку.

**Гарантия не распространяется** на изделие, поврежденное вследствие удара; механического воздействия; несанкционированного ремонта или внесения изменений в конструкцию; пожара, стихийных бедствий или природных явлений.

Изделие проверено в моем присутствии, получено в полностью укомплектованном виде, в исправном состоянии, в заводской упаковке, без внешних дефектов и механических повреждений.

С условиями гарантии ознакомлен. Претензий не имею.



Отметка о продаже торгующей организацией

Подпись покупателя

Сохраняйте руководство по эксплуатации и кассовый чек в течение всего действия гарантийного срока. При возникновении неисправности обращайтесь в сервисный центр, указанный торгующей организацией.

**Срок службы** не менее 5 лет. При соблюдении пользователем правил эксплуатации и бережном отношении к изделию срок его службы может быть значительно больше указанного.

Для получения рекомендаций по дальнейшему использованию изделия по истечении указанного срока службы или для проведения гарантийного обслуживания обратитесь в уполномоченный сервисный центр. Адреса сервисных центров указаны на сайте [www.mos-amros.ru](http://www.mos-amros.ru) в разделе “Сервисные центры”.

При отсутствии в Вашем городе сервисного центра направьте изделие по адресу:

Россия, 109028, г. Москва, ул. Яузская, д. 1/15, стр. 5, ЗАО фирма “Москва-Амрос”.

**Дополнительную информацию можно получить по адресу:**

[www.mos-amros.ru](http://www.mos-amros.ru) e-mail: [info@mos-amros.ru](mailto:info@mos-amros.ru) или по телефону 8 800 250 01 06 (звонок бесплатный).

## ХРАНЕНИЕ

Храните изделие после очистки в сухом и чистом месте.

Не подвергайте изделие воздействию высокой температуры, влажности и пыли.

Оберегайте изделие от воздействия прямых солнечных лучей.

Температура хранения и транспортирования от минус 20 до плюс 60°С.

## УТИЛИЗАЦИЯ

После окончания срока службы изделие не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды.

По классификации медицинских отходов (СанПиН 2.1.7.728-99 от 22.03.1999) изделие относится к классу А – эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к твердым бытовым отходам.

Согласно ст. 4.1 Федерального закона N 89-ФЗ от 24.06.1998 изделие относится к классу V - практически неопасные отходы и подлежит утилизации с твердыми бытовыми отходами в соответствии с действующими местными нормативными актами и правилами.

Данная маркировка на изделии указывает, что его не следует

утилизировать вместе с пищевыми отходами по окончании

его срока службы.

