

Изделия ортопедические для профилактики и реабилитации инвалидов с принадлежностями: костыли моделей AMUC01, AMUC02, AMUC03, AMFC11, AMFC12, AMFC13 и принадлежности AMCT83 ко всем указанным моделям; AMFC14 и принадлежности AMCT82 к ним

ПАСПОРТ

Производитель: «Амрус Энтерпрайзис Лтд.» США Amrus Enterprises, Ltd.
AMRUS 720 King Georges Post Road, Suite 305, Fords, New Jersey 08863 -1974, USA

Импортер / Организация, уполномоченная на принятие претензий:

ЗАО фирма «Москва-Амрос»,
Россия, 115054, Москва, ул. Пятницкая, д.71/5, стр.4, эт.1

Место производства Foshan Zubon Technology Co., Ltd., 2/F-1, No.5 Plant,
Yungang Industrial Zone, Shidong Village, Shilian,
Danzao Town, Nanhai District, Foshan City, China

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора

№ РЗН 2016/4188 от 26.11.2021

Соответствие: ГОСТ Р 50444-2020 ГОСТ Р ИСО 11334-1-2010
ГОСТ Р 51632-2014

Срок службы: не менее 2 лет

При соблюдении пользователем правил эксплуатации и бережном отношении к изделиям срок их службы может быть значительно больше указанного. Для получения рекомендаций по дальнейшему использованию изделий по истечении указанного срока службы обратитесь в сервисный центр.

Срок гарантии: на костыли - 12 месяцев
на опорные резиновые наконечники - 3 месяца

Срок годности: отсутствует

При отсутствии отметки о дате продажи срок гарантии и срок службы исчисляется с даты производства.

Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные вследствие:

- удара, небрежного обращения;
- несанкционированного ремонта или внесения изменений в конструкцию;
- попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- несоблюдения потребителем правил эксплуатации;
- пожара, стихийных бедствий или природных явлений.

С условиями действия гарантии ознакомлен.

Претензий к внешнему виду не имею.



2026

Дата продажи

Подпись покупателя

Адреса сервисных центров в регионах России указаны на сайте www.mos-amros.ru в разделе «Сервисные центры».

При отсутствии в Вашем городе сервисного центра направьте изделие по адресу: Россия, 109028, г. Москва, ул. Яузская, д.1/15, стр.5, ЗАО фирма «Москва-Амрос»,
Дополнительную информацию можно получить по адресу:

www.mos-amros.ru

E-mail: info@mos-amros.ru

телефон 8 800 250 01 06

Отметки о ремонте

Изделия ортопедические для профилактики и реабилитации инвалидов с принадлежностями: костыли моделей AMUC01, AMUC02, AMUC03, AMFC11, AMFC12, AMFC13 и принадлежности АМСТ83 ко всем указанным моделям; AMFC14 и принадлежности АМСТ82 к ним - служат для увеличения устойчивости пользователя при ходьбе и уменьшения нагрузки на ноги за счет ее переноса на верхнюю часть туловища и руки. Предназначены для пользователей, имеющих повреждения или заболевания опорно-двигательного аппарата, ослабленных или имеющих нарушения чувства равновесия, с массой тела до 100 кг. Выполнены из алюминиевого сплава. В моделях AMUC01, AMUC02, AMUC03 предусмотрены отдельные регулировки: длины костылей - с шагом регулировки 2,5 см, и расположения рукоятки костылей - с шагом 3,75 см.

Модель	Рост пользователя*	Высота костылей min-max
AMUC01	137-157 см	92,5-113,5 см
AMUC01 с УПС	140-160 см	95,2-116,0 см
AMUC02	157-178 см	112,2-132,8 см
AMUC02 с УПС	160-181 см	115,5-135,5 см
AMUC03	178-198 см	133,0-153,5 см
AMUC03 с УПС	181-201 см	136,0-156,5 см

*Приблизительные значения в зависимости от индивидуальных особенностей, таких как как длина конечностей и пропорции тела.

Костыли моделей AMUC01, AMUC02, AMUC03 могут комплектоваться встроенным устройством противоскольжения (УПС).

В моделях AMFC11, AMFC12, AMFC13 предусмотрена отдельная регулировка длины нижней и верхней секций костылей с шагом 2,5 см.

Модель	Длина нижней секции	Длина верхней секции
AMFC11 с УПС	54,5-77,5 см	24,0-31,5 см
AMFC12 с УПС	71,0-93,5 см	24,0-31,5 см
AMFC13 с УПС	87,5-110,5 см	24,0-31,5 см
AMFC14 с УПС	75,0-97,0 см	23,0 см

Предельное отклонение от параметров ± 10 мм.

Костыли моделей AMFC11, AMFC12, AMFC13, AMFC14 имеют встроенное устройство противоскольжения (УПС). В рукоятке модели AMFC14 имеется светоотражающая вставка. Принадлежности АМСТ82, АМСТ83 - опорные резиновые наконечники - сменные, с металлическим вкладышем.

Сохраняйте костыли в чистом и сухом виде. Очистку поверхности рукояток производите теплой водой со слабым раствором моющего средства.

Металлические детали

очищайте влажной тканью.

Не допускайте повреждения декоративных покрытий костылей твердыми и острыми предметами.

