

Изделия ортопедические для профилактики и реабилитации инвалидов с принадлежностями: трости и палки опоры моделей АМСQ21, АМСТ23, АМСТ25, АМСС31, АМСС33, АМСС37, АМСО45, АМСF51 и принадлежности АМСТ81, АМТ84.

ПАСПОРТ

Производитель: «Амрус Энтерпрайзис Лтд.» США Amrus Enterprises, Ltd.
AMRUS 720 King Georges Post Road, Suite 305, Fords, New Jersey 08863-1974, USA

Импортер / Организация, уполномоченная на принятие претензий:

ЗАО фирма «Москва-Амрос»,
115054, РФ, Москва, ул. Пятницкая, д.71/5, стр.4, эт.1

Место производства Foshan Zubon Technology Co., Ltd., 2/F-1, No.5 Plant,
Yungang Industrial Zone, Shidong Village, Shilian,
Danzao Town, Nanhai District, Foshan City, China/Китай

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора

№ РЗН 2016/4188 от 26.11.2021

Соответствие: ГОСТ Р 51632-2014 ГОСТ Р 57764-2017 ГОСТ 50444-2020

Срок службы: не менее 2 лет

При соблюдении пользователем правил эксплуатации и бережном отношении к изделиям срок их службы может быть значительно больше указанного.

Для получения рекомендаций по дальнейшему использованию изделий по истечении указанного срока службы обратитесь в сервисный центр.

Срок гарантии: на трости и палки-опоры - 12 месяцев
на опорные резиновые наконечники - 3 месяца

Срок годности: отсутствует

При отсутствии отметки о дате продажи срок гарантии и срок службы исчисляется с даты производства.

Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные вследствие:

- удара, небрежного обращения;
- несанкционированного ремонта или внесения изменений в конструкцию;
- попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- несоблюдения потребителем правил эксплуатации;
- пожара, стихийных бедствий или природных явлений.

С условиями действия гарантии ознакомлен.

Претензий к внешнему виду не имею.

 2026

Дата продажи

Подпись покупателя

Адреса сервисных центров в регионах РФ указаны на сайте www.mos-amros.ru в разделе «Сервисные центры».

При отсутствии в Вашем городе сервисного центра направьте изделие по адресу: Россия, 109028, г. Москва, ул. Яузская, д.1/15, стр.5., ЗАО фирма «Москва-Амрос»,

Дополнительную информацию можно получить по адресу:

www.mos-amros.ru

E-mail: info@mos-amros.ru

телефон 8 800 250 01 06

Отметки о ремонте

Изделия ортопедические для профилактики и реабилитации инвалидов с принадлежностями: трости моделей AMCQ21, AMCT23, AMCT25, AMCC31, AMCC33, AMCO45, AMCS37, AMCF51 и принадлежности AMCT81, AMIT84 служат для увеличения устойчивости пользователя при ходьбе и уменьшения нагрузки на ноги за счет переноса ее на верхнюю часть туловища и руки. Предназначены для пользователей, имеющих повреждения или заболевания опорно-двигательного аппарата, ослабленных или имеющих нарушения чувства равновесия, с массой тела до 113 кг. Выполнены из алюминиевого сплава с покрытиями различных цветов.

Модель	AMCQ 21	AMCT 23	AMCT 25	AMCC 31	AMCC 33	AMCS 37	AMCO 45	AMCF 51
Высота трости min-max, см	70,5-93	79-102	79,5-102	73,5-96	79,5-102,5	84-92	75,5-98,5	82-92
Высота сиденья, min-max, см	-	-	-	-	-	50-57,5	-	-
Длина рукояти, см	11,5	12	12	15,5	13	12	11,5	12
Ширина рукояти, см	3,5	2,5	2,5	3	2,2	2,5	3,5	2,5
Вес, г	780	400	374	330	440	1050	312	360
Устройство против скольжения (УПС)	-	+	-	-	+	-	-	-

Шаг регулировки всех тростей - 2,5 см.

Трость AMCQ21 с четырьмя ножками, опорная секция - асимметричная, поворачивается для использования под правую или левую руку; размер стальной опорной секции 22,0x16,0 см.

Трости AMCT23, AMCC33 имеют встроенное устройство противоскольжения (УПС).

Трость AMCO45 имеет центрированную относительно продольной оси опоры рукоятку и страховочный ремешок.

Трость AMCF51 - складная. В сложенном виде размещается в чехле длиной 31,0 см.

Трость AMCS37 - комбинированная трость-стул, позволяет чередовать ходьбу с отдыхом. Высота сиденья максимальная - 57,5 см, минимальная - 50 см.

Опорный сменный резиновый наконечник AMCT81 выполнен в двух вариантах - с и без отверстия для УПС. Противогололедная насадка AMIT84 - съемная, поворотная, металлическая.

Сохраняйте трости в чистом и сухом виде. Очистку поверхности рукояток производите теплой водой со слабым раствором моющего средства. Металлические детали очищайте влажной тканью. Не допускайте повреждения декоративных покрытий тростей твердыми и острыми предметами.

