

**Гарантийный талон**  
**на кресло-коляску для инвалидов: модель AMWC18RA-SF/E**  
(с литыми шинами и съемными подножками)

1. Срок действия гарантии: 1 год. Гарантийный талон должен содержать дату продажи, заверенную печатью продавца, и подпись покупателя.
2. При отсутствии в талоне даты продажи срок гарантии исчисляется с даты изготовления.

Сохраняйте гарантийный талон и кассовый чек в течение всего действия гарантийного срока.

3. В случае обнаружения неисправности в гарантийный период покупатель может обратиться в сервисный центр для ремонта только при наличии настоящего гарантийного талона.

4. Гарантия не распространяется на изделие, гарантийный талон которого содержит неполную, неразборчивую, исправленную или незаверенную печатью продавца информацию.

Гарантия не распространяется на изделие, поврежденное вследствие:

- удара, небрежного обращения;
- несанкционированного ремонта или внесения изменений в конструкцию;
- попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- несоблюдения потребителем правил эксплуатации;
- пожара, стихийных бедствий или природных явлений.



\_\_\_\_\_  
Дата продажи

Адреса сервисных центров указаны на сайте [www.mos-amros.ru](http://www.mos-amros.ru) в разделе «Сервисные центры».

При отсутствии в Вашем городе сервисного центра направьте изделие по адресу: Россия, 109028, г. Москва, ул. Яузская, д. 1/15, стр. 5,  
ЗАО фирма «Москва-Амрос».

Дополнительную информацию можно получить по адресу: [www.mos-amros.ru](http://www.mos-amros.ru)  
E-mail: [info@mos-amros.ru](mailto:info@mos-amros.ru) 800-250-0106 (Регионы); 8 495-617-1606 (Москва).  
Согласно Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 г. №2463 медицинские изделия надлежащего качества обмену и возврату не подлежат.

Изделие получено в полностью укомплектованном виде, в исправном состоянии, в заводской упаковке, с руководством по эксплуатации на русском языке, без внешних дефектов и механических повреждений.

С условиями действия гарантии ознакомлен.

Претензий к внешнему виду не имею.



**AMRUS**

**Значение символов:**

- Дата производства
- Логотип производителя

**Отметки о ремонте**

\_\_\_\_\_  
Подпись покупателя

**Кресло-коляска для инвалидов:**  
**модель AMWC18RA-SF/E**  
(с литыми шинами и съемными подножками)

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**



- |                       |                     |                                 |
|-----------------------|---------------------|---------------------------------|
| 1 - сиденье;          | 2 - подлокотники;   | 3 - подножки;                   |
| 4 - опора для голени; | 5 - опоры для стоп; | 6 - рычаги для снятия подножек; |
| 7 - передние колеса;  | 8 - рычаги тормоза; | 9 - задние колеса;              |
| 10 - спинка.          |                     |                                 |

Кресло-коляска для инвалидов: модель AMWC18RA-SF/E, складная со стальной хромированной рамой, с ручным приводом, литыми шинами передних и задних колес, фиксированными подлокотниками и съёмными подножками, с опорой для голени (далее - изделие), предназначена для передвижения больных с частичной потерей функций опорно-двигательного аппарата в условиях помещений и на открытых площадках с твердым покрытием, (исключая автомобильные дороги общего пользования), самостоятельно или с помощью сопровождающего лица.

Специальные требования к квалификации пользователей отсутствуют.

Риски применения и побочные эффекты отсутствуют. При необходимости проконсультируйтесь с лечащим врачом.

### **Технические характеристики**

Ширина сиденья, мм	- 500
Глубина сиденья, мм	- 400
Габариты (ШДВ), мм	- 640 x 1060 x 860
Ширина в сложенном состоянии, мм	- 230
Диаметр передних колес, мм	- 190
Диаметр задних колес, мм	- 570
Масса, кг	- 16,0
Грузоподъемность, кг	- 113
Температура эксплуатации, °С	от минус 40 до плюс 40

Стойкость к возгоранию материалов, используемых для обивки мягких элементов изделия, соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015.

### **Комплект поставки**

Кресло-коляска	- 1 шт.
Узел подножек	- 2 шт.
Опора для голени	- 1 шт.
Руководство по эксплуатации	- 1 шт.
Комплект инструментов	- 1 шт.
Упаковочная коробка	- 1 шт.

### **Меры безопасности**

При посадке больного в кресло и высадке из него задние колеса (9) должны быть заблокированы тормозом (8), а опоры для стоп (5) подножек (3) должны находиться в вертикальном положении. Вставать на опоры для стоп (5) при посадке и высадке в кресло не допускается.

### **Подготовка изделия к эксплуатации**

Изделие раскладывается и складывается без применения специальных средств. Сложенное изделие положите на пол, и, потянув подлокотник и раму вверх, не перекашивая раму, раздвиньте изделие на ширину сиденья (1), затем присоедините и зафиксируйте подножки (3). Допускается раздвинуть изделие, находящуюся в вертикальном положении. Для хранения и транспортировки сложите изделие: поднимите опоры для стоп (5), потяните вверх сиденье (1) и сдвиньте вместе подлокотники (2).

### **Подножки**

Изделие комплектуется съёмными подножками (3) с опорами для стоп

(5) и опорой для голени (4). Для снятия подножки нажмите на рычаг (6), поверните и снимите подножку со штифтов.

В случае ослабления фиксации опоры для стоп (5) или для регулировки её по высоте, ослабьте болт-фиксатор в торце подножки (3), отрегулируйте положение опоры и затяните болт-фиксатор по часовой стрелке.

### **Подлокотники**

Изделие оборудовано фиксированными подлокотниками (2).

### **Тормоз**

Изделие оборудовано стояночными тормозами (8) обоих задних колес (9). Для торможения передвиньте рычаг тормоза (8) вперед до полной блокировки колес (9).

### **Комплект инструментов**

В комплект инструментов входят накидной и шестигранный ключи.

### **Обслуживание и уход при эксплуатации**

Очистку поверхности сиденья (1) и спинки (10) изделия производите теплой водой со стиральным порошком.

### **Внимание**

Во время движения не сдвигайтесь на сиденье вперед и не допускайте ударов передних колес о препятствия и неровности на дороге (камни, выбоины, дорожный бордюр).

Не допускайте повреждения декоративных покрытий изделия твердыми и острыми предметами.

### **Данные о регистрации**

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора:  
№ ФСЗ 2007/00972 от 26.12.2007

Производитель: «Амрус Энтерпрайзис Лтд.», США,  
Amrus Enterprises, Ltd., 720 King Georges Post Road,  
Suite 3E, Fords, New Jersey 08863, USA

Место производства: Amrus Enterprises, Ltd., 720 King Georges Post Road,  
Suite 3E, Fords, New Jersey 08863, USA

Импортер / организация, уполномоченная на принятие претензий:

ЗАО фирма «Москва-Амрос»,  
Россия, 115054, Москва, ул. Пятницкая, д. 71/5, стр. 4, эт. 1

Соответствие требованиям:

ГОСТ Р 51083-2015 ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015  
ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015

Срок службы: не менее 5 лет

При соблюдении пользователем правил эксплуатации и бережном отношении к изделию срок службы может быть значительно больше указанного.

Для получения рекомендаций по дальнейшему использованию изделия по истечении указанного срока службы обратитесь в ближайший сервисный центр. После окончания срока службы изделие не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды (класс А по классификации медицинских отходов) и подлежит утилизации с твердыми бытовыми отходами.