



АДАПТЕР
В КОМПЛЕКТЕ

ИНГАЛЯТОР КОМПРЕССОРНЫЙ MT-210A



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Оглавление

Назначение	5
Функциональные особенности	5
Требования безопасности и меры предосторожности	6
Принцип работы	7
Показания	7
Противопоказания	7
Возможные побочные эффекты	7
Потребители	8
Возможность использования с другими медицинскими изделиями	8
Комплектация	8
Внешний вид основного блока ингалятора	9
Схематичное изображение основных частей ингалятора	9
Преимущества ингаляционной терапии	10
Правила проведения ингаляции	10
Подготовка к использованию	12
Использование ингалятора	14
Очистка и дезинфекция	16
Технические характеристики	17
Техническое обслуживание и ремонт	18
Зарядка аккумулятора	19
Замена фильтра	19
Устранение неисправностей	20
Символы маркировки потребительской тары	22
Условия хранения и транспортирования	22
Условия эксплуатации	23
Срок службы	23
Утилизация	24
Электромагнитная совместимость	24
Сертификация	25
Соответствие требованиям	25
Срок гарантии	25
Информация о производителе и импортере	26

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение высококачественного и надежного компрессорного ингалятора MediTech MT-210A (далее – ингалятор), производства Medical Technology Products, Inc., USA / «Медикал Текнолоджи Продактс, Инк.», США.

Внимание!

Перед началом эксплуатации ингалятора внимательно ознакомьтесь с данным руководством по эксплуатации, следуйте его указаниям и сохраните для дальнейшего использования.

При выборе типа, дозировки и режима введения лекарственного средства следуйте указаниям лечащего врача.

НАЗНАЧЕНИЕ

Ингалятор предназначен для генерации и транспортирования аэрозоля жидкого лекарственного средства в органы дыхания пациентов всех возрастов.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Автономный: работает от встроенного аккумулятора.
- Надежный: на основной блок ингалятора предоставляется гарантия 3 года. В течение всего срока службы ингалятора предоставляется бесплатное сервисное обслуживание.
- Комфортный в использовании: малый вес, компактный размер и компрессор с пониженным уровнем шума.
- Технологичный: наличие функции регулировки скорости распыления препарата.
- Удобный в эксплуатации: крепление-присоска фиксирует ингалятор на столе, предотвращая его случайное падение.
- Экологичный: при производстве используются только безопасные материалы. В ингаляторе и принадлежностях к нему отсутствуют фталаты и канцерогены.
- Максимальная комплектация: в комплекте детская и взрослая маски, мундштук, канюля назальная универсальная с насадкой, чехол для хранения и переноски. Подходит для всей семьи.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Используйте ингалятор только по назначению врача и исключительно в целях, предусмотренных настоящим руководством.
- Оберегайте ингалятор от падений и сильных ударов во избежание повреждений.
- Не оставляйте без присмотра ингалятор, подключённый к электрической сети.
- Не используйте ингалятор во время купания и принятия ванн.
- Не допускайте попадания внутрь ингалятора воды или других жидкостей.
- Не пытайтесь достать упавший в воду ингалятор. Немедленно отключите его от электрической сети.
- Не используйте ингалятор в запыленной среде, или среде, обогащённой кислородом.
- Не допускайте бесконтрольного использования ингалятора детьми или лицами с ограниченными физическими возможностями.
- Храните ингалятор в недоступном для детей месте.
- Не допускайте контакта шнура питания с нагретыми поверхностями.
- Запрещается использовать ингалятор в случае повреждения шнура питания или сетевого адаптера.
- Запрещается вносить в ингалятор конструктивные изменения.
- Не используйте ингалятор в случае появления неисправностей, посторонних шумов или отклонений в работе. Установите причину и способ ее устранения в соответствии с указаниями раздела «Устранение неисправностей».

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Принцип работы ингалятора основан на преобразовании лекарственного средства в аэрозольные частицы за счет смешивания со сжатым воздухом, нагнетаемым компрессором и дальнейшим контактом с дефлектором.

ПОКАЗАНИЯ

Ингалятор применяется для профилактики и лечения широкого спектра заболеваний верхних и нижних дыхательных путей, таких как осложнения ОРВИ, фарингит, ларингит, трахеит, бронхит, хроническая обструктивная болезнь легких, бронхиальная астма, пневмония и другие.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Ингалятор не обеспечивает слежение за состоянием пациента. Ингалятор нельзя использовать для ингаляционной анестезии и искусственной вентиляции легких; при сердечно-сосудистых заболеваниях, отягощенных дыхательной недостаточностью; при тяжелой форме эмфиземы легких.

ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

Во время ингаляции возможно появление кашля, как реакция на введение распыляемого раствора лекарственного препарата.

ПОТРЕБИТЕЛИ

В лечебных учреждениях – медицинские работники. В домашних условиях – пользователи, имеющие показания к лечению лекарственными аэрозолями. Специальные требования к квалификации потребителей отсутствуют.

ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ДРУГИМИ МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ

Ингалятор не предназначен для использования совместно или в комбинации с другими медицинскими изделиями.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Основной блок ингалятора МТ-210А – 1 шт.

Чашка ингалятора – 1 шт.

Дефлектор – 1 шт.

Крышка дефлектора – 1 шт.

Трубка компрессорная – 1 шт.

Штуцер – 1 шт.

Мундштук – 1 шт.

Маска детская – 1 шт.

Маска взрослая – 1 шт.

Канюля назальная универсальная – 1 шт.

Насадка канюли назальной – 1 шт.

Фильтр – 5 шт.

Адаптер сетевой – 1 шт.

Шнур питания – 1 шт.

Чехол – 1 шт.

Руководство по эксплуатации – 1 экз.

ВНЕШНИЙ ВИД ОСНОВНОГО БЛОКА ИНГАЛЯТОРА

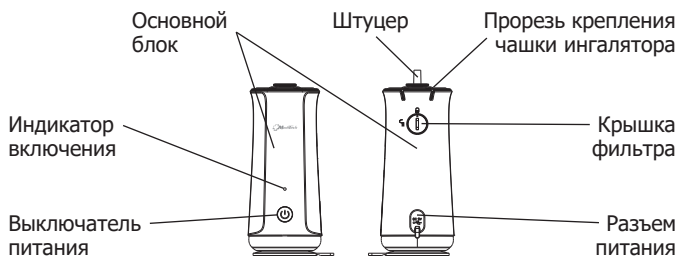


Рисунок 1.

СХЕМАТИЧНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ЧАСТЕЙ ИНГАЛЯТОРА



Рисунок 2.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИНГАЛЯЦИОННОЙ ТЕРАПИИ

Ингаляционная терапия имеет ряд преимуществ перед другими способами доставки лекарственных препаратов в верхние и нижние отделы дыхательных путей:

- Безболезненное введение аэрозоля в организм.
- Лекарственное средство в виде аэрозоля сразу попадает в дыхательные пути, минуя желудок и кишечник, не вызывая побочных реакций со стороны других органов и систем.
- Действие лекарственного препарата в виде аэрозоля происходит значительно быстрее, чем при приеме таблетированных форм.

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ИНГАЛЯЦИИ

Внимание!

Запрещается использовать для ингаляции сиропы от кашля, настои и отвары трав, спиртовые настойки, эфирные масла, лекарственные средства, содержащие масла.

- Ингалятор позволяет использовать широкий спектр препаратов, в том числе муколитики, антибиотики, гормоны.
- Перед использованием каких-либо лекарственных препаратов проконсультируйтесь с врачом.
- Если во время проведения процедуры ингаляции возникла аллергическая реакция на препарат, немедленно прекратите процедуру и обратитесь к лечащему врачу.
- Убедитесь, что срок годности лекарственного средства не истек. Не используйте просроченные лекарства.
- Соблюдайте правила приготовления раствора, указанные в инструкции к лекарственному препарату.
- Храните приготовленный раствор в холодильнике не более суток. Перед применением согрейте раствор до комнатной температуры.

- В зависимости от лекарственных препаратов, таких как суспензии или сильновязкие вещества, производительность может изменяться, что не указывает на неисправность ингалятора.
- Начинайте ингаляцию через 1-1,5 часа после приема пищи и проведения физических нагрузок.
- Исключите разговоры во время ингаляции.
- Одежда не должна затруднять дыхание.
- Маска для взрослых и маска для детей рекомендуются к использованию при заболеваниях верхних и нижних отделов дыхательных путей.
- Мундштук рекомендуется к использованию при заболеваниях нижних отделов дыхательных путей.
- Канюля назальная универсальная с мягкой насадкой рекомендована для увлажнения, профилактики и лечения заболеваний верхних дыхательных путей.
- Дышите спокойно в обычном режиме. Если лечащий врач рекомендует иной способ дыхания, следуйте этим рекомендациям.
- Не принимайте перед ингаляцией средства, улучшающие отхождение мокроты, а также не полощите рот антисептическими средствами.
- После процедуры прополощите рот кипяченой водой комнатной температуры. Если для ингаляции использовалась маска, необходимо также промыть лицо и глаза.
- Прием пищи допускается не ранее 15-20 минут после ингаляции.

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- Перед первым использованием ингалятора удалите все упаковочные материалы, очистите и продезинфицируйте согласно указаниям раздела «Очистка и дезинфекция».
- Разместите ингалятор перед собой на устойчивой, прочной и плоской поверхности или удерживайте в руках за корпус.
- Убедитесь, что фильтр, установленный в основном блоке ингалятора, чистый, не изменил цвет и не использовался более года. При необходимости замените его, как указано в разделе «Замена фильтра».
- Подключите разъем USB type-A шнура питания к USB порту адаптера сетевого, а разъем USB type-C к разъему питания основного блока, предварительно сняв с него защитную заглушку. Затем включите адаптер в розетку электрической сети переменного тока.
- Нажмите кнопку выключателя питания "⏻" и проверьте работоспособность основного блока и заряд аккумулятора. Индикатор включения должен светиться зеленым цветом в непрерывном режиме и должен быть слышен звук работающего компрессора. Свечение индикатора включения желтым цветом в мигающем режиме указывает на необходимость зарядки аккумулятора.
- Нажмите кнопку выключателя питания "⏻", чтобы выключить ингалятор.
- При необходимости зарядите аккумулятор, как указано в разделе «Зарядка аккумулятора», или проведите сеанс лечения от сетевого адаптера. Для этого подключите разъем USB type-A шнура питания к USB порту адаптера сетевого, а разъем USB type-C к разъему питания основного блока, предварительно сняв с него защитную заглушку. Затем включите адаптер в розетку электрической сети переменного тока.
- Снимите дефлектор с чашки ингалятора, аккуратно повернув его против часовой стрелки.

- Залейте лекарственное средство в чашку ингалятора, соблюдая рекомендованную дозировку от 2 до 8 мл (Рисунок 3).
- Установите дефлектор в чашку ингалятора и поверните его по часовой стрелке до совмещения символов  и  (Рисунок 4).
- Установите крышку в дефлектор и закройте отверстия на ней, поворотом заслонки (Рисунок 5).

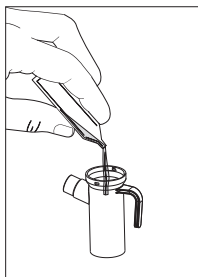


Рисунок 3.

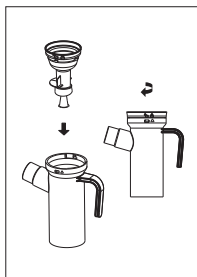


Рисунок 4.

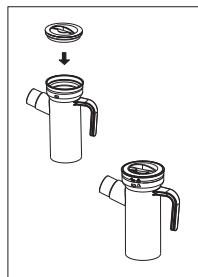


Рисунок 5.

- Присоедините мундштук, назальную канюлю или маску к патрубку чашки ингалятора (Рисунок 6).
- Присоедините чашку ингалятора к основному блоку одним из двух способов:

- а) присоедините чашку ингалятора к выходному отверстию основного блока, расположенному в верхней части корпуса прибора (Рисунок 7). Убедитесь, что чашка ингалятора плотно зафиксирована.
- б) Вставьте штуцер в выходное отверстие основного блока ингалятора, далее присоедините трубку компрессорную к чашке ингалятора, другой ее конец – к штуцеру (Рисунок 8).

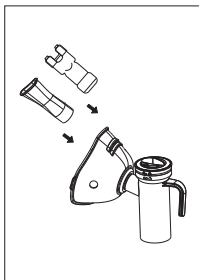


Рисунок 6.

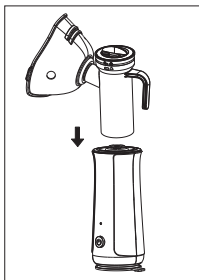


Рисунок 7.

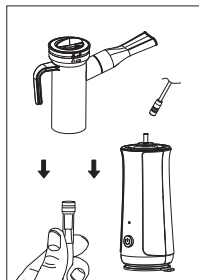


Рисунок 8.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНГАЛЯТОРА

- Включите ингалятор, нажав кнопку выключателя питания "⏻". Начнется образование аэрозоля.
- Отрегулируйте поворотом заслонки на крышке дефлектора скорость распыления лекарственного препарата для более комфортного проведения ингаляции в соответствии с индивидуальными потребностями пользователя (ребенка или взрослого). Высокая скорость распыления (открытая заслонка) сокращает время проведения процедуры ингаляции. Рекомендована для взрослых пользователей. Низкая скорость распыления (закрытая заслонка) подходит для детей и пользователей со слабыми сосудами носа.
- Старайтесь удерживать чашку ингалятора или корпус прибора с установленной на нем чашкой вертикально, наклоняя не более, чем на 45 градусов.
- Проведите сеанс лечения вдыхая аэрозоль через мундштук, разместив его между зубами (Рисунок 9) или через канюлю назальную с насадкой, вдыхая через нос.

- При использовании маски разместите её так, чтобы она плотно прилегала ко рту и носу (Рисунок 10). Не допускайте попадания аэрозоля в глаза, это может вызвать раздражение.



Рисунок 9.

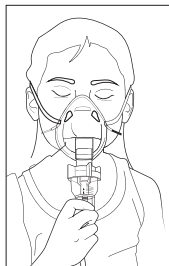


Рисунок 10.

- Если процедуру ингаляции нужно прервать или завершить, нажмите кнопку выключателя питания "⏻", чтобы выключить ингалятор.
- Если сеанс лечения проводился при подключенном сетевом адаптере – отключите адаптер от сети переменного тока, шнур питания от адаптера и основного блока, закройте заглушкой разъем питания на основном блоке.
- Потяните за язычок на присоске, чтобы открепить ингалятор от поверхности.
- Проведите очистку ингалятора согласно указаниям раздела «Очистка и дезинфекция» и поместите его в место хранения.

ОЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Очистка

Очистку ингалятора проводите после каждого применения.

- Выключите ингалятор, и отключите его от сети.
- Протрите корпус основного блока ингалятора и трубку компрессорную влажной тканью.
- Снимите чашку ингалятора или отсоедините штуцер с трубкой компрессорной от выходного отверстия основного блока.
- Отсоедините трубку компрессорную (если использовалась) маски детскую или взрослую, канюлю назальную, мундштук, чашку ингалятора, крышку чашки ингалятора, дефлектор и штуцер.
- Промойте их, за исключением трубки компрессорной, в воде комнатной температуры со средством для мытья посуды.
- Тщательно ополосните проточной водой и просушите.

Удостоверьтесь, что выходное отверстие в чашке ингалятора и дефлекторе не закупорено, это может снизить эффективность распыления. Не используйте посторонние предметы при очистке чашки ингалятора и дефлектора.

- Не используйте кипяток для очистки вышеперечисленных комплектующих ингалятора.

Дезинфекция

- Для дезинфекции ингалятора протрите корпус и комплектующие спиртосодержащим раствором.
- После дезинфекции штуцер, маски, канюлю назальную, насадку канюли назальной, мундштук, чашку ингалятора, крышку чашки ингалятора и дефлектор тщательно ополосните проточной водой и просушите.

При появлении влаги в трубке компрессорной, для ее удаления включите ингалятор с присоединенной трубкой, не подключая чашку ингалятора.

Своевременная очистка комплектующих поможет увеличить продолжительность их использования.

Износ материалов комплектующих может произойти после некоторого количества очисток и/или дезинфекций. При обнаружении любых физических изменений или изменения цвета, необходимо заменить указанные части на новые.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основной блок	Значение*
Масса основного блока, кг	0,233
Габаритные размеры основного блока, мм	65x65x163
Емкость чашки ингалятора максимальная, мл	8,0
Емкость чашки ингалятора минимальная, мл	2,0
Остаточный объем, мл	до 1,0
Средний размер частиц (MMAD), мкм	3,0
Респирабельная фракция, %	70
Производительность, мл/мин	0,2
Рабочий цикл (ВКЛ/ВЫКЛ), мин	20/30
Время установления рабочего режима, сек, не более	3
Электропитание	220В, 50Гц
Потребляемая мощность, Вт, не более	10

* Примечание: предельное отклонение параметров $\pm 10\%$

Аккумулятор	Значение*
Выходное напряжение, В	3,7
Емкость, мА/ч	2000
Время полной зарядки, мин	150
Время непрерывной работы, мин	50
Срок службы	300 циклов
Адаптер сетевой	Значение*
Входное напряжение переменного тока	220В, 50Гц
Выходное напряжение постоянного тока, В	5 (+0,25 / -0,60)
Максимальный выходной ток, А	2
Класс электробезопасности	II
Рабочая часть	типа BF
Выходной разъем	USB Type-A

* Примечание: предельное отклонение параметров $\pm 10\%$

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

Техническое обслуживание производится силами пользователя и включает в себя очистку основного блока, масок, мундштука, канюли назальной универсальной с насадкой, чашки ингалятора, дефлектора, крышки дефлектора, штуцера, трубки компрессорной, замену фильтра, зарядку аккумулятора. Для технического обслуживания ингалятора применение инструментов не требуется. Ингалятор не содержит узлов, требующих регулировки или смазки в течение всего срока службы. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать или разобрать основной блок ингалятора. Не вскрывайте аккумуляторную батарею. Для диагностики и ремонта ингалятора обратитесь в сервисный центр. Адреса сервисных центров указаны на сайте mos-amros.ru.

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Подключите разъем USB Type-A шнура питания к адаптеру сетевому, разъем USB Type-C – к основному блоку и включите адаптер в сеть. Во время зарядки аккумулятора индикатор светится зеленым цветом в мигающем режиме. По окончании зарядки индикатор светится зеленым непрерывно. Отключите адаптер от сети, шнур питания – от адаптера и основного блока. Закройте заглушкой разъем питания на основном блоке. В случае длительного перерыва в использовании изделия заряжайте аккумулятор каждые 3 месяца.

ЗАМЕНА ФИЛЬТРА

- Проверяйте состояние фильтра каждые 30 дней.
- Если фильтр загрязнён, изменил цвет или использовался более года, замените его новым.
- Замену фильтра производите только при выключенном, отключенном от сети и полностью остывшем ингаляторе.
- Снимите крышку фильтра, повернув ее против часовой стрелки до упора и вынув из корпуса ингалятора.
- Удалите фильтр из крышки (Рисунок 11).
- Установите новый фильтр в крышку.
- Установите крышку фильтра на место и поверните ее по часовой стрелке до совмещения символов  и . Убедитесь, что она надежно закреплена.
- Запасные фильтры можно приобрести дополнительно.
- Запрещается очищать или мыть использованные фильтры. Это может привести к повреждению ингалятора.

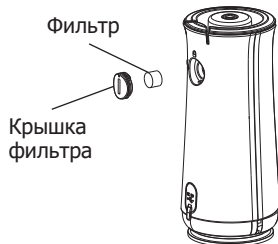


Рисунок 11.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема / Вопрос	Возможная причина	
Ингалятор не включается	Разряжена аккумуляторная батарея	
	Убедитесь в отсутствии повреждений шнура питания или сетевого адаптера	
	Отсутствует напряжение в сети переменного тока	
Слабое распыление лекарственного препарата, низкая производительность	Низкий уровень зарядки аккумуляторной батареи	
	Трубка компрессорная перегнута или засорена	
	Фильтр загрязнен или установлен неправильно	
	Трубка компрессорная пропускает воздух	
	В чашке ингалятора содержится слишком маленький или большой объем лекарственного препарата	
	Неправильная установка дефлектора	
	Загрязнение сопла чашки ингалятора или дефлектора	
	Механические повреждение чашки ингалятора, дефлектора, крышки дефлектора	
	Чашка ингалятора расположена под наклоном более 45 градусов	
	Лекарственный препарат непригоден для ингаляции (слишком густой)	
	Неисправность основного блока	
Необычно громкий звук работы ингалятора	Крышка фильтра установлена неправильно, отсутствует фильтр	
	Неисправность основного блока	
В чашке ингалятора остается раствор для ингаляций	Это нормально и связано с техническими особенностями технологии распыления	

Способ устранения
Зарядите аккумуляторную батарею
Проверьте правильность подключения адаптера к розетке. В случае повреждения обратитесь в сервисный центр
Убедитесь, что электричество не отключено
Проверьте уровень заряда аккумулятора. При необходимости - зарядите
Проверьте трубку компрессорную, в случае засорения прочистите или замените
Проверьте корректность установки фильтра, замените на новый при необходимости
Проверьте плотность подключения трубки к чашке ингалятора и к выходному штуцеру основного блока. Если утечка воздуха продолжается, замените трубку компрессорную
Устраните несоответствие. Минимальное количество - 2 мл, максимальное - 8 мл.
Проверьте правильность установки дефлектора в чашке ингалятора
Проверьте отсутствие загрязнений, при необходимости промойте или замените на новые
Проверьте элементы на наличие повреждений; при необходимости замените неисправные комплектующие
Выводите положение чашки
Используйте лекарство, рекомендованное для применения через ингалятор
Обратитесь в сервисный центр для диагностики и ремонта
Устранить несоответствие, установить новый фильтр
Обратитесь в сервисный центр для диагностики и ремонта
Остановите ингаляцию, когда услышите заметную разницу в звуке работающего ингалятора

СИМВОЛЫ МАРКИРОВКИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ТАРЫ

Символ	Значение
	Дата изготовления
	Утилизировать отдельно от пищевых отходов согласно местным законам
	Осторожно! Обратитесь к руководству по эксплуатации
IP21	Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой
	Рабочая часть BF
	Изделие класса II
	Обратитесь к руководству по эксплуатации

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Ингалятор следует хранить в оригинальной потребительской таре в сухих проветриваемых помещениях, защищенных от солнечных лучей и атмосферных воздействий. Храните ингалятор в недоступном для детей месте.

Характеристика	Значение
Температура, °C	от -20 до +70
Относительная влажность, %	от 10 до 95

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Характеристика	Значение
Температура, °C	от +5 до +40
Относительная влажность, %	от 10 до 95

СРОК СЛУЖБЫ

Основной блок ингалятора - 5 лет.

Адаптер сетевой и шнур питания - 3 года.

Маска взрослая, маска детская, мундштук, канюля назальная универсальная, насадка канюли назальной, дефлектор, крышка дефлектора, чашка ингалятора, штуцер, трубка компрессорная, фильтр – 1 год.

Срок службы ингалятора исчисляется с даты продажи, указанной в гарантийном талоне. При отсутствии даты продажи, срок службы исчисляется с даты изготовления ингалятора, указанной на основном блоке.*

При соблюдении пользователем правил эксплуатации и бережном отношении к ингалятору, реальный срок службы может быть значительно больше указанного.

* раздел "Символы маркировки потребительской тары"

УТИЛИЗАЦИЯ

После окончания срока службы ингалятор не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды.

Основной блок, адаптер сетевой и шнур питания относится к классу V опасности (отходы электротехнического оборудования согласно Директиве N 2002/96/ЕС от 27.01.2003) и утилизируется в соответствии с местными нормативными актами и правилами.

Аккумулятор относится к классу II опасности и подлежит утилизации отдельно от твердых бытовых отходов в соответствии с местными нормативными актами и правилами.

Маска взрослая, маска детская, мундштук, канюля назальная универсальная, насадка канюли назальной, дефлектор, крышка дефлектора, чашка ингалятора, штуцер, трубка компрессорная, фильтр по классификации медицинских отходов относятся к классу А (СанПиН 2.1.3684-21) – эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к твердым бытовым отходам.

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ

Ингалятор использует радиочастотную энергию только для выполнения внутренних функций. Ингалятор не создает электромагнитного излучения, оказывающего влияние на другое оборудование. Конструкция ингалятора имеет конструктивную защиту от воздействия внешних электромагнитных полей.

Ингалятор не создает при эксплуатации ионизирующее, рентгеновское или электромагнитное излучение, требующее защиты от него потребителей или третьих лиц.

Ингалятор пригоден для использования в любых местах размещения, включая жилые дома и здания, непосредственно подключенные к распределительной электрической сети, питающей жилые дома.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора
№ РЗН 2023/19443 от 21.08.2025 г.

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ Р 50444-2020; ГОСТ Р МЭК 60601-1-2022;
ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014

СРОК ГАРАНТИИ

Гарантийный срок на основной блок ингалятора – 3 года,
на адаптер сетевой и шнур питания – 1 год.

Гарантия не распространяется на составные части, подверженные износу (штуцер, дефлектор, крышка дефлектора, чашка ингалятора, трубка компрессорная, мундштук, маска детская, маска взрослая, канюля назальная универсальная, насадка канюли назальной, фильтр) и потребительскую тару.

Гарантийный срок исчисляется с даты продажи, указанной в гарантийном талоне. При отсутствии даты продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления ингалятора, указанной на основном блоке.*

* раздел "Символы маркировки потребительской тары"

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ И ИМПОРТЕРЕ

Производитель:

«Медикал Текнолоджи Продактс, Инк.», США /
Medical Technology Products, Inc., 720 King Georges Post Road,
Suite 305, Fords, New Jersey 08863-1974, USA

Место производства:

Joytech Healthcare Co., Ltd., No. 365, Wuzhou Road, 311100 Hangzhou,
Zhejiang Province, P.R. of China / Китай

Импортер:

ЗАО фирма «Москва-Амрос», Россия, 115054, г. Москва,
ул. Пятницкая, д. 71/5, стр. 4, эт. 1.

По вопросам качества изделия обращаться к эксклюзивному
дистрибьютеру в России ЗАО фирма «Москва-Амрос»
телефон: +7 495 617 1606,
8 800 250-01-06 (для звонков из регионов)
e-mail: info@mos-amros.ru.
сайт: www.mos-amros.ru



эксклюзивный дистрибьютер в России
+7 (495) 617-16-06 (Москва), 8 800 250-01-06 (Регионы)
www.mos-amros.ru